


# Guía de medición

## Instrucciones:

- 1 Imprima este archivo Adobe PDF al 100 % en su impresora. Utilice la comprobación de precisión que figura a la derecha en este documento (tarjeta de crédito) para garantizar que la copia impresa tenga el tamaño adecuado.
- 2 Pliegue la parte inferior de esta página por la línea discontinua.
- 3 Recorte la página por la línea discontinua situada alrededor del medidor de ajuste.
- 4 Coloque el medidor de ajuste debajo de su nariz, como se muestra en la imagen siguiente.
- 5 Determine el tamaño adecuado según la zona a la que llegue su nariz.  
(S: pequeña, M: mediana o L: grande)

Philips Respironics recomienda siempre consultar a un médico o especialista en sueño, para asegurarse que la mascarilla está correctamente colocada y ajustada.

## Amara View

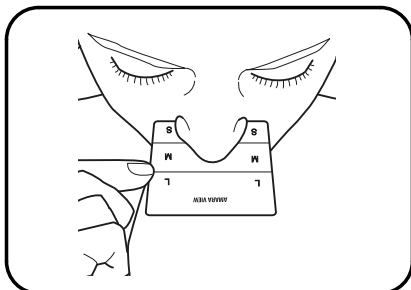

**DOBLE por la línea discontinua**

## Imprimir comprobación de precisión



## Medidor de ajuste

**CORTE por la línea discontinua**

